

miyasuku EyeConLT 更新版インストール手順

※google Chrome を使用しています。


※更新版のインストールの前に、miyasuku EyeConLT を終了しておいてください。

- 1.miyasuku ホームページの「miyasuku EyeConSWLT のご紹介」の「ダウンロード」ボタンを押してください。




- 2.ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。

- 3.ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。

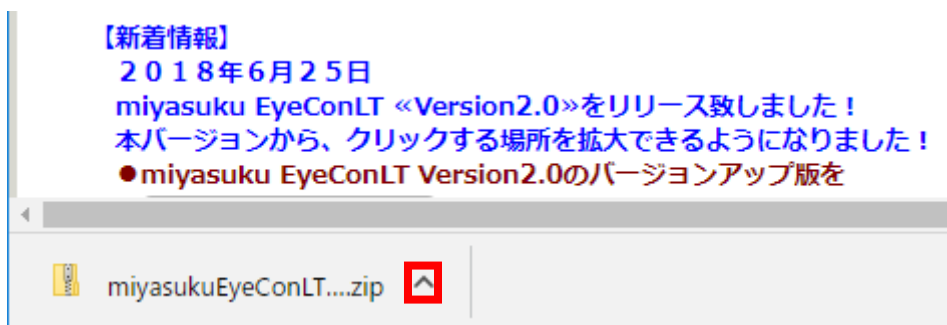


4.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。

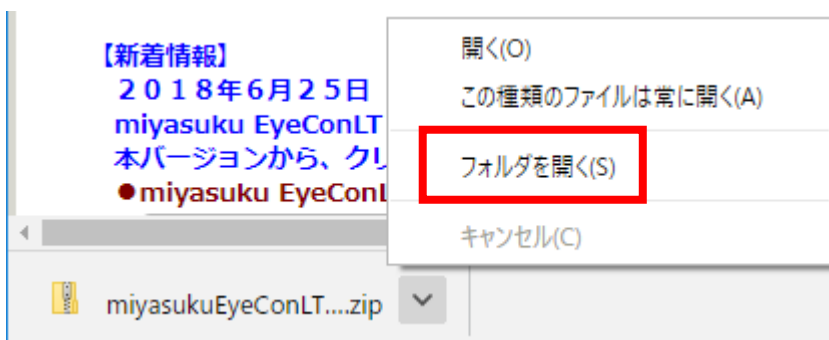


5. 「miyasukuEyeConLT2.0.zip」ファイルを選択してください。

※ファイル名の「2.0」の部分はバージョンです。


インストールするバージョンの番号に変えて、お読みください。

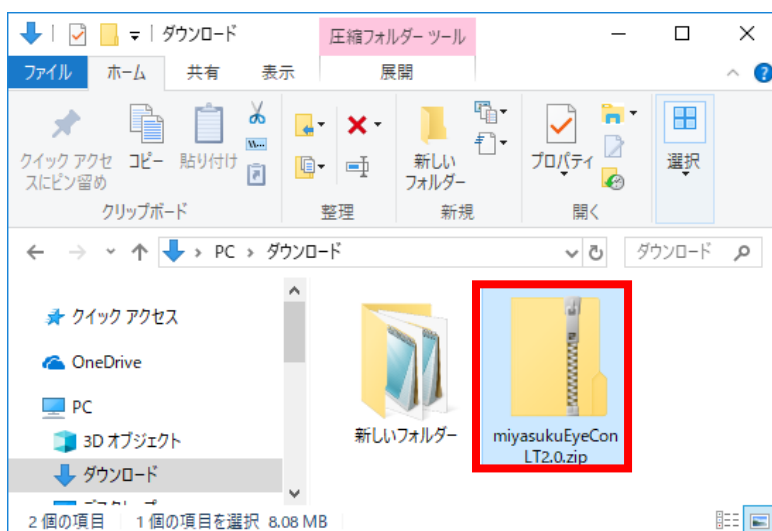


6.画面上部の「展開」をクリックしてください。

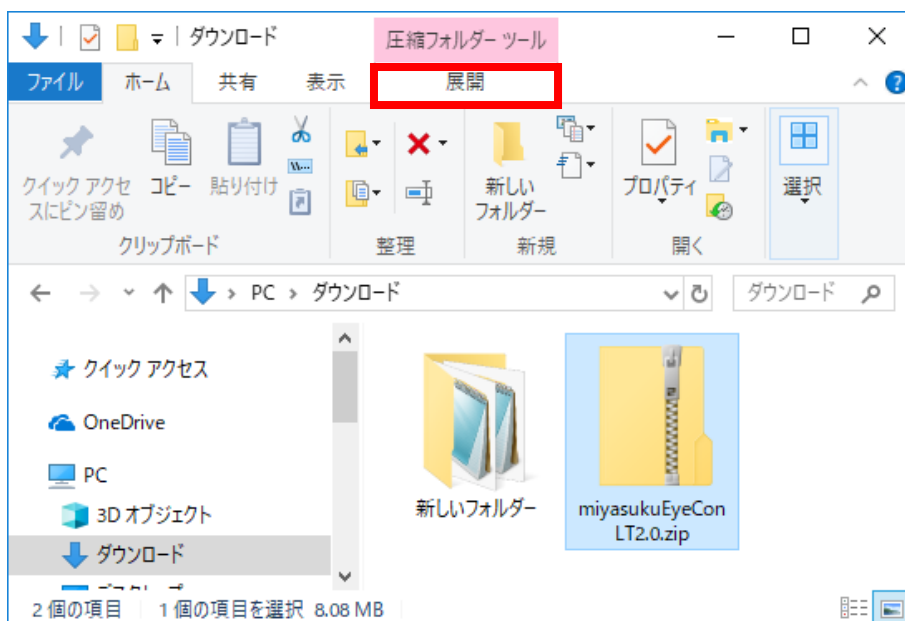

7. 「すべて展開」をクリックしてください。

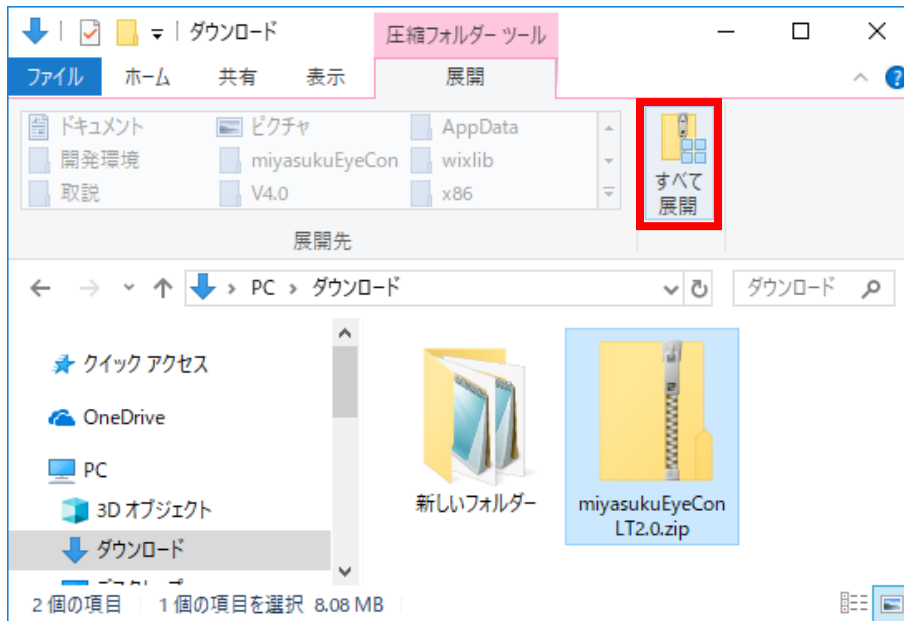


8. 「展開」ボタンをクリックしてください。

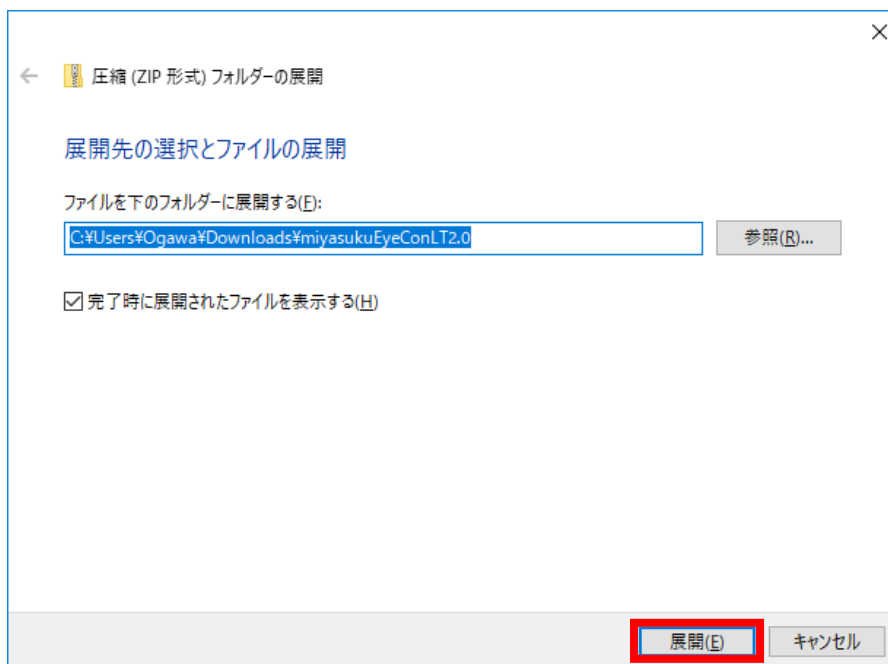


9. 「miyasukuEyeConLT2.0」フォルダを開いてください。

※ファイル名の「2.0」の部分はバージョンです。


インストールするバージョンの番号に変えて、お読みください。

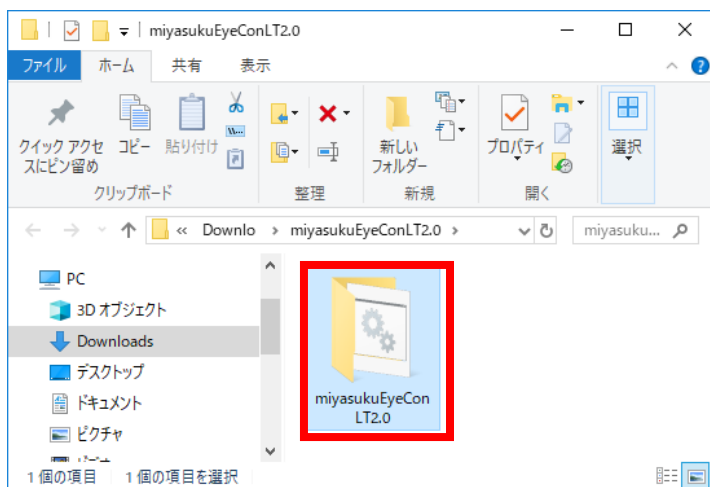


10. 「update」ファイルを起動してください。

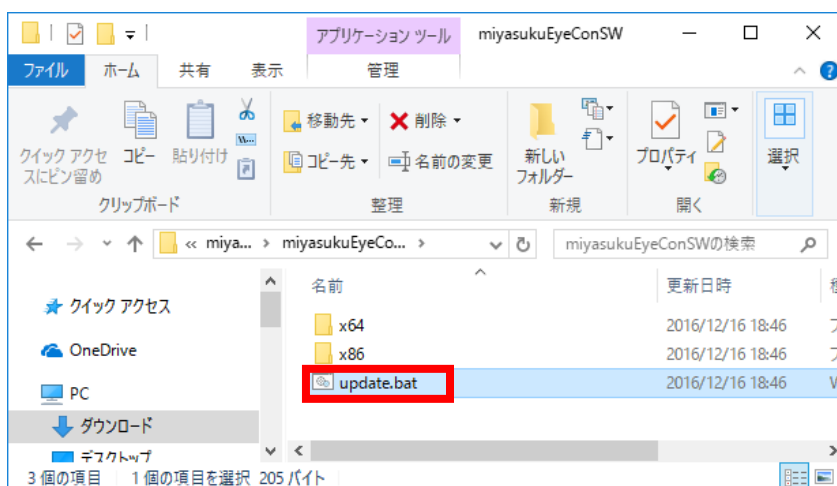

11.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

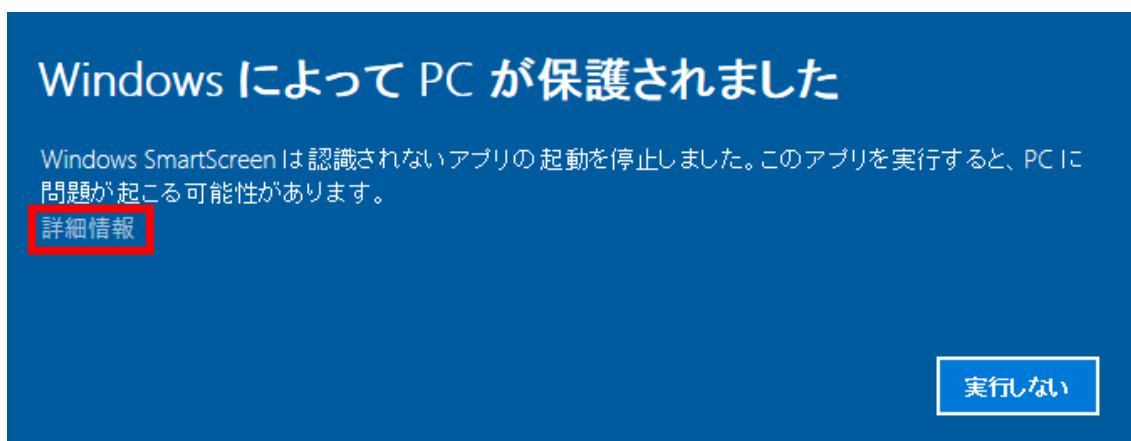


12. 「実行」 ボタンをクリックしてください。

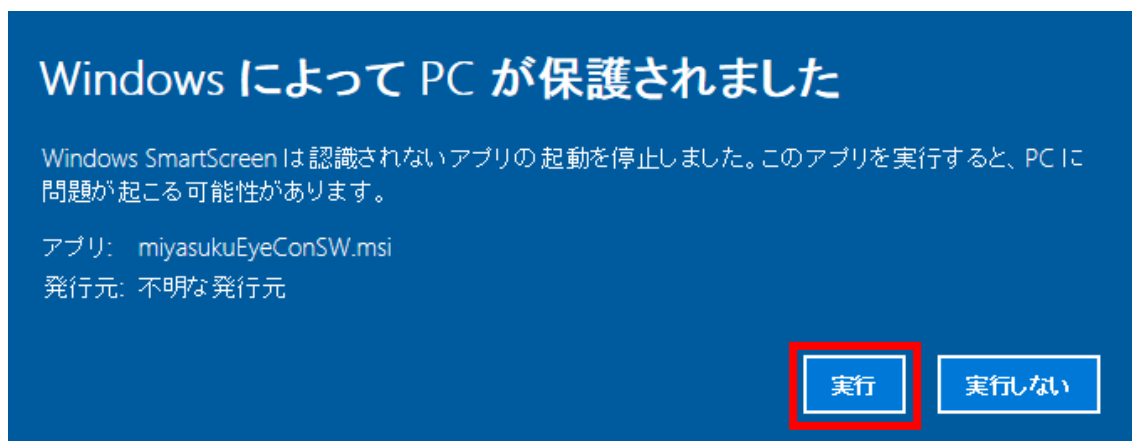


13. インストーラが起動するので、「次へ」 ボタンをクリックしてください。




14. 「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

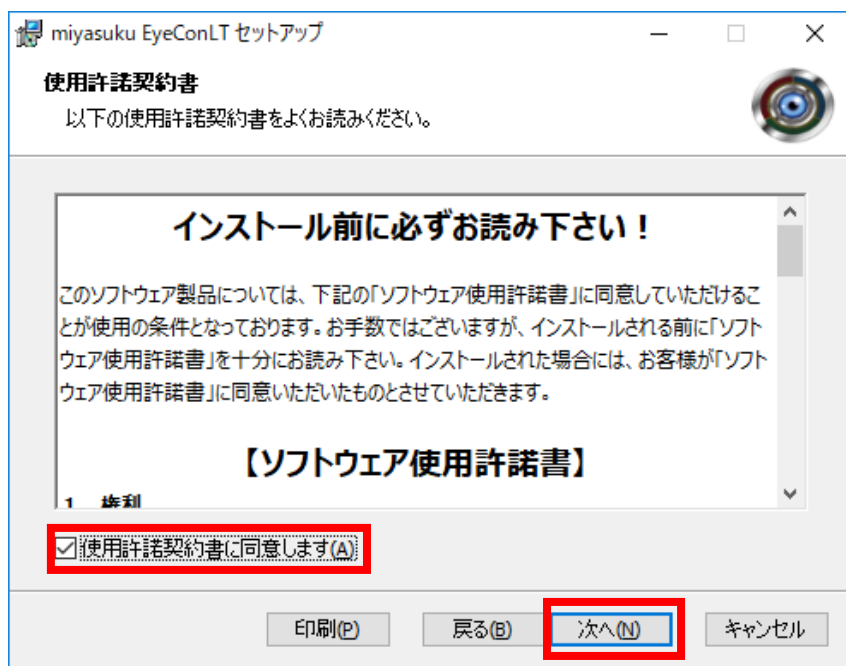

15. 「次へ」ボタンをクリックしてください。

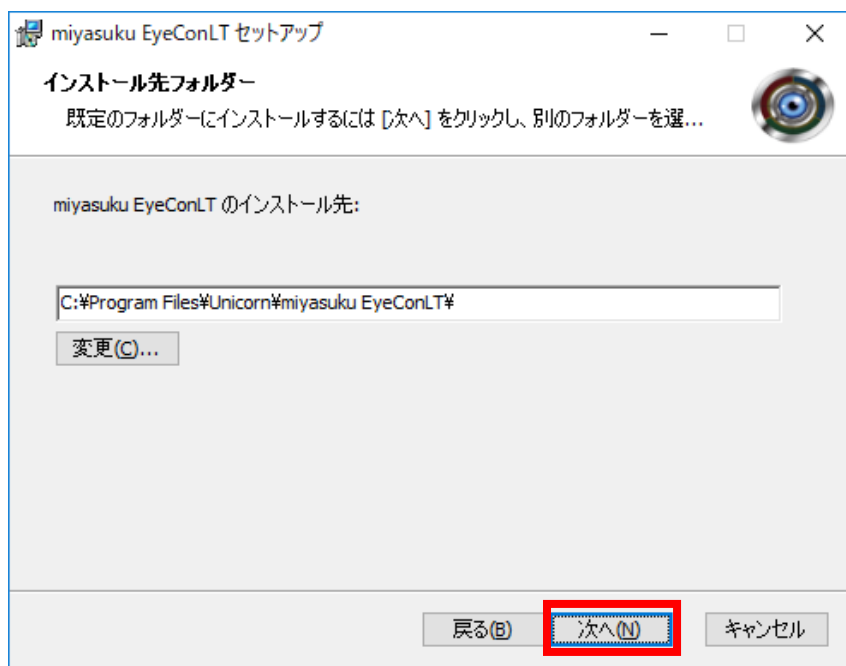


16. 「インストール」 ボタンをクリックしてください。

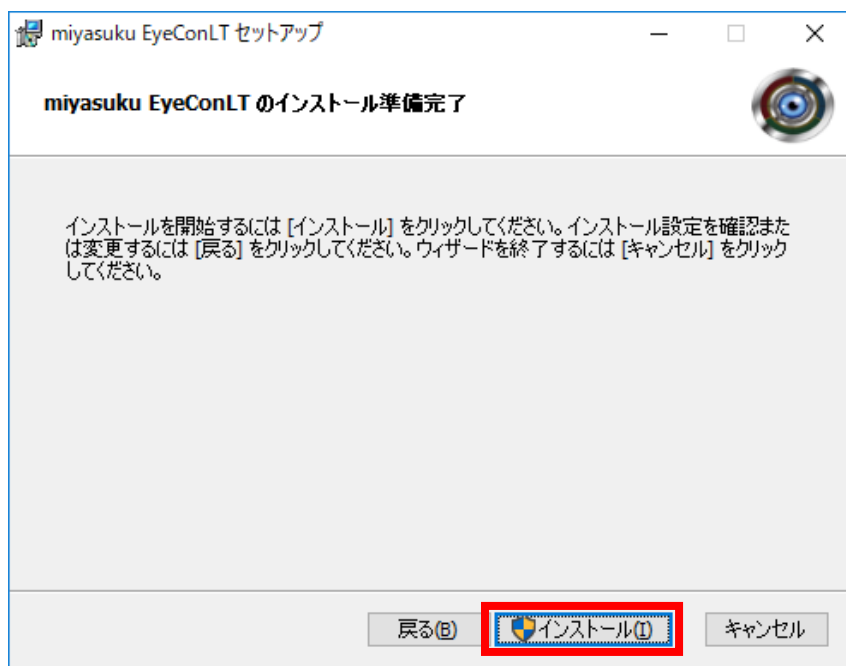


17. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。

※この画面は Windows8 の画面です。

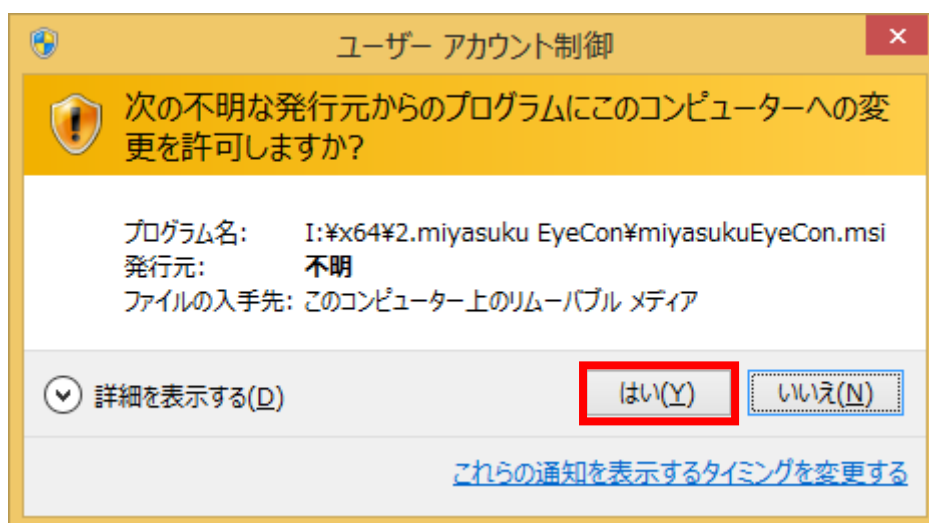

18.インストールが終わるまで、しばらくお待ちください。

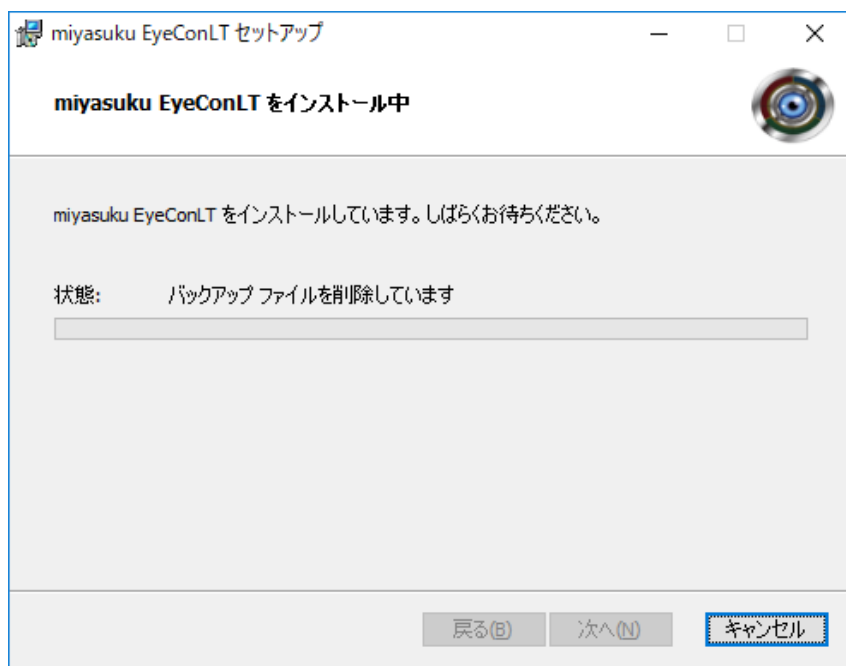

19.インストールが終わったら、「完了」ボタンをクリックしてください。

