

miyasuku EyeConMouse インストール情報回復手順

※google Chrome を使用しています。

1.miyasuku ホームページ右上の「ログイン」をクリックしてください。



2.メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。

ログイン

ユーザー登録がお済みの方はログインしてください。

※ログインしてください。

メールアドレス	*****@miyasuku.***
パスワード	●●●●●●

ログインする

3.miyasuku ホームページ右側の「【New】製品のご紹介」をクリックしてください。

マイページ



小川忍 様、ようこそ。

- [製品のご紹介・ダウンロード](#)
- [miyasukuソフトウェアライセンスを購入する](#)

✓ 商品代金のお支払

✓ ✓ マイページ

✓ 【New】新着情報

✓ 開発の目的

✓ ✓ 【New】製品のご紹介

✓ 料金体系

4. 「■製品のご紹介」の中から「miyasuku EyeConMouse」を探し、クリックしてください。

■ 製品のご紹介

以下の一覧から製品を選択してください。

miyasuku EyeConMouse

miyasuku EyeConMouseは、市販の視線入力装置を利用した高性能の「パソコン操作アプリ」です。また、「ゲームパッド」やオプションの「スイッチボックス」にスイッチを接続すれば、視線とスイッチのシームレスな切替えによってWindowsアプリを簡単に操作できますので、皆様のパソコンライフを強力にサポートします！

●カタログのダウンロードは、こちら [ダウンロード](#)

●2週間無料体験版 [ダウンロード](#)

【インストール手順】

- (1) ダウンロードしたZIPファイルを解凍してください。
- (2) 解凍したフォルダ内の[install.bat]ファイルを起動してください。
- (3) 画面の指示に従って、インストールしてください。

[miyasuku EyeConSW](#)

★miyasuku EyeConSW Version3.3.4を公開致しました。

5.回復ツールのダウンロードボタンをクリックしてください。


【重要】Windows10のApril 2018 Updateの更新について

Windows10のApril 2018 Updateに更新すると、miyasuku EyeConMouseのインストール情報が変更される場合があります。インストール情報が変更されると、miyasuku EyeConMouseが正しくインストールされていないと判断し、起動できなくなります。このようになった場合は、回復ツールを実行し、インストール情報を回復してください。

★回復ツールを [ダウンロード](#)

6.ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。


7.ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。

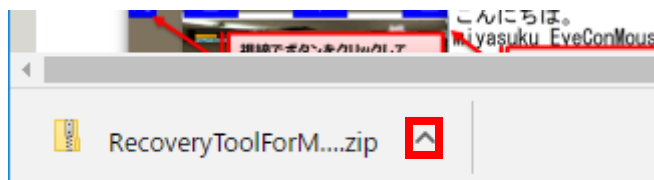


8.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。




9. 「RecoveryToolForMouse.zip」ファイルを選択してください。

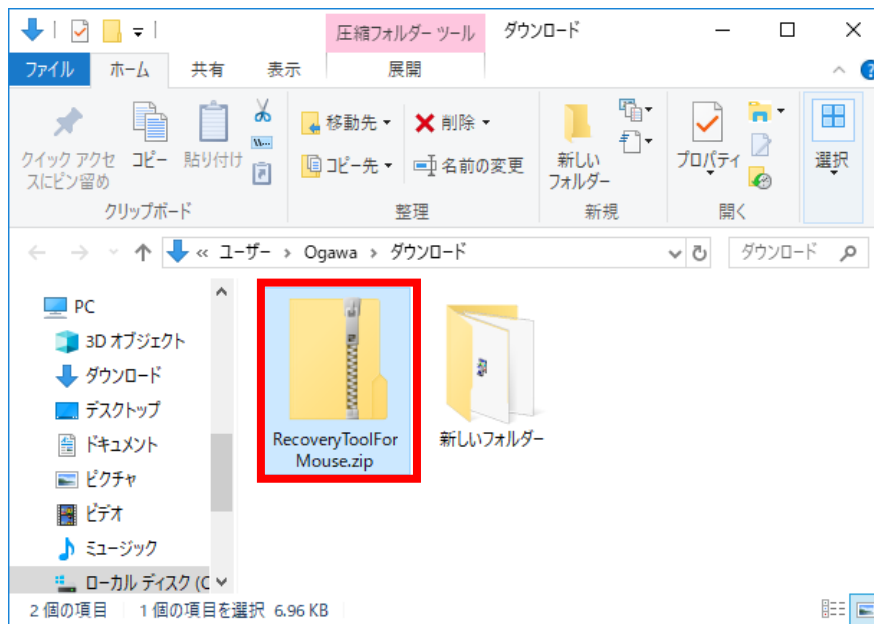


10.画面上部の「展開」をクリックしてください。

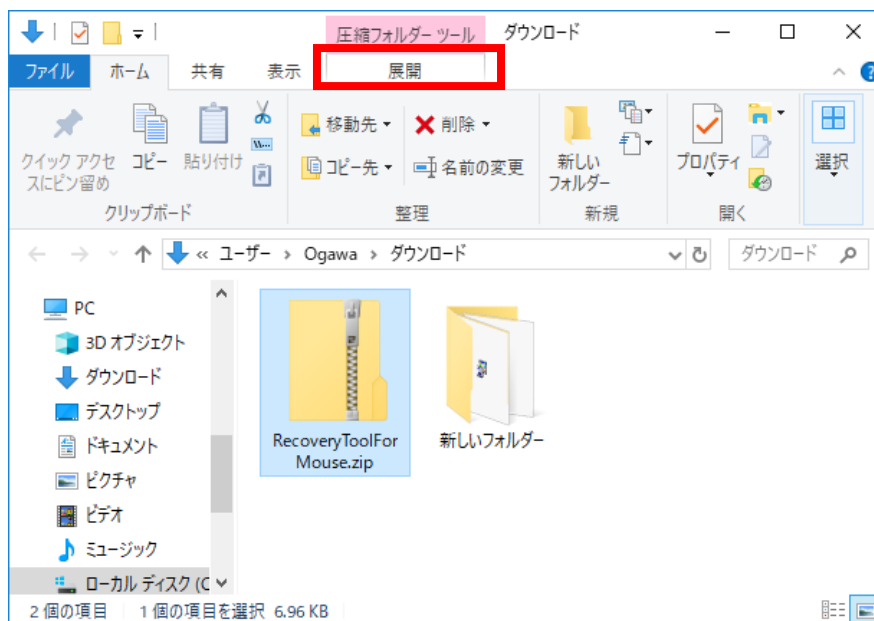


11. 「すべて展開」をクリックしてください。

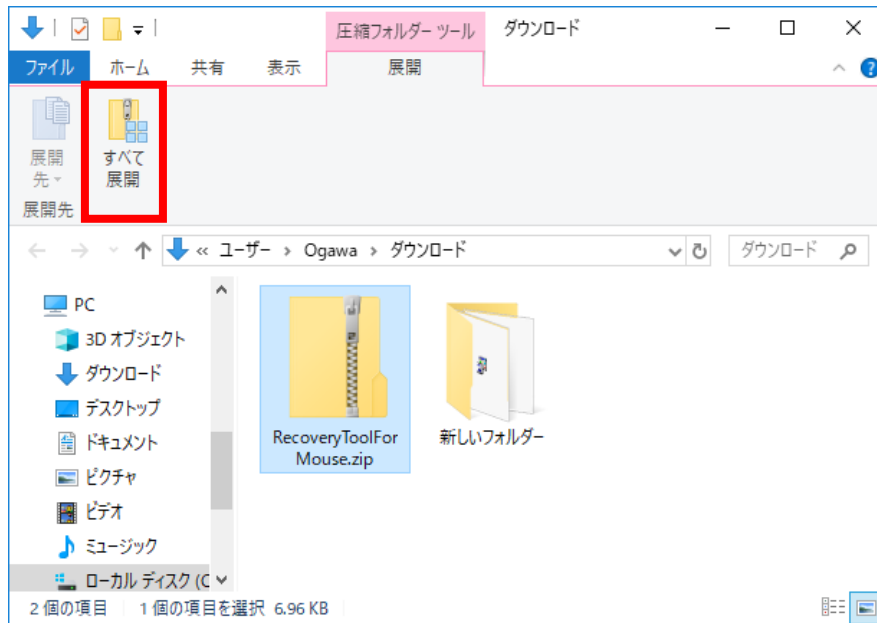


12. 「展開」ボタンをクリックしてください。

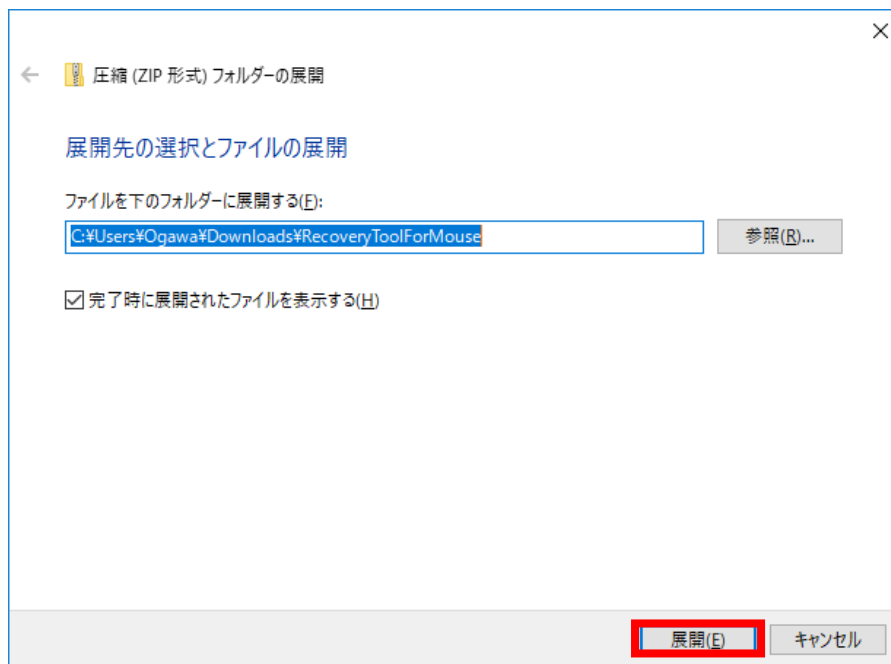

13. 「RecoveryToolForMouse.exe」 ファイルを起動してください。

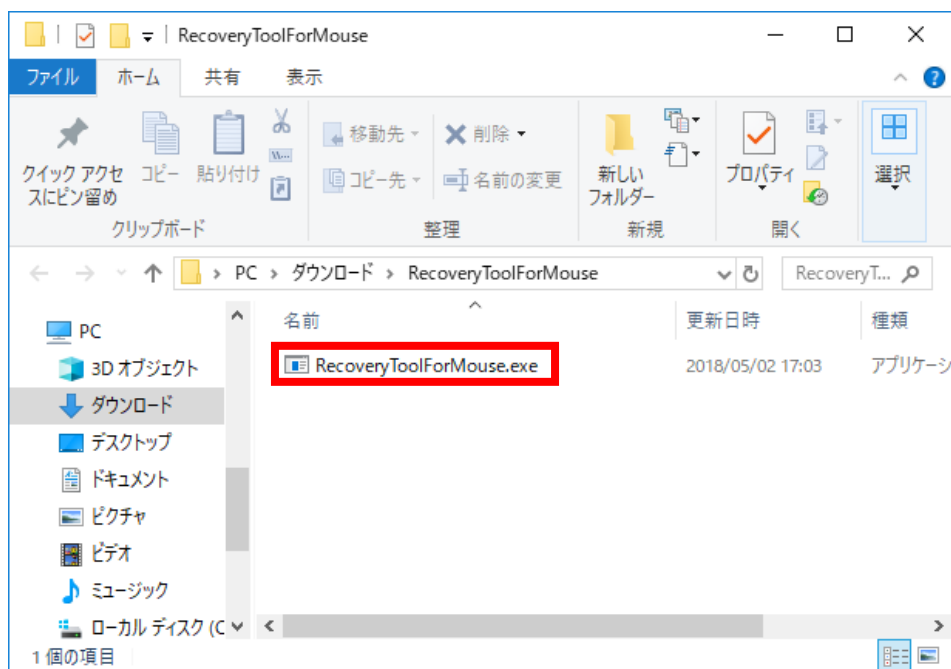

14.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

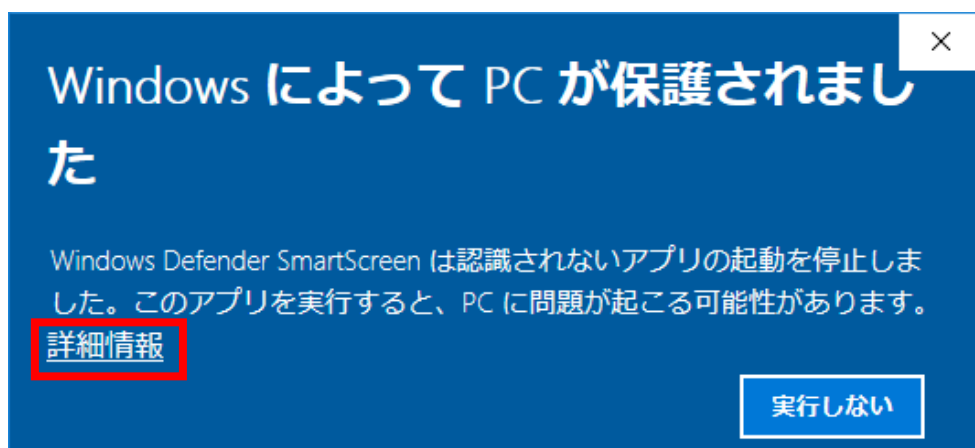

15.「実行」 ボタンをクリックしてください。



16. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンを押してください。

17. miyasuku EyeConMouse のインストール USB をお持ちの場合、パソコンにインストール USB を取り付けてください。

18. 「miyasuku EyeConMouse 回復ツール」の「回復」ボタンを押してください。

